

Návod k použití pro vyšetřovací lehátko

CLASSIC



CARE UNLIMITED

PROMA REHA, s.r.o.,

Riegrova 342, CZ-55203 Česká Skalice,

tel.: +420 491 11 22 33, fax: +420 491 54 11 85,

IČO: 63219107, DIČ: CZ63219107

info@promareha.cz, www.promareha.cz,

reg. v obchodním rejstříku Krajského soudu
v Hradci Králové oddíl C, vložka 7945



CE

Vyšetřovací lehátko CLASSIC
bez zdvihu ložné plochy

Obsah

1.	Úvod.....	3
2.	Způsob dodávky	3
3.	Bezpečnostní pokyny	3
4.	Podmínky použití	3
5.	Technické parametry	3
6.	Instalace a uvedení lehátka do provozu.....	4
7.	Obsluha lehátka	4
8.	Čištění.....	4
9.	Skladování	4
10.	Údržba	4
11.	Servis.....	5
12.	Záruka.....	5
13.	Likvidace výrobku.....	5
14.	Obsah balení	5
15.	Kontakt	5

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste se rozhodl zakoupit výrobek naší společnosti. Společnost PROMA REHA, s.r.o. je významným výrobcem pomůcek pro osoby se zdravotním handicapem nejen v České Republice, kde působí již více než 20 let. Výrobky společnosti PROMA REHA, s.r.o. jsou známé moderními lehkými konstrukcemi, které však přes svoji nízkou hmotnost dosahují špičkových parametrů, pevnosti a užitné spolehlivosti. Pečlivá povrchová úprava, promyšlená konstrukce a technologie výroby, spojená se špičkovým zpracováním všech povrchových ploch, dává předpoklad jejich dlouhé životnosti. Proto pevně věříme, že Vám bude zakoupený výrobek sloužit dlouho a k Vaší naprosté spokojenosti. Aby tomu tak skutečně mohlo za všech provozních podmínek být, prosíme Vás o důkladné pročtení a dodržování následujících bezpečnostních, obslužných, provozních a servisních pokynů. V případě jakýchkoliv potíží či nejasností kontaktujte, prosím, naše technické oddělení na níže uvedené adrese, případně našeho obchodního zástupce, který koupí našeho výrobku zprostředkoval. Tamtéž můžete získat i potřebné informace týkající se dodávek náhradních dílů, možností servisních zásahů, oprav či provádění periodických bezpečnostně-technických kontrol. Další aktuální informace o firmě, kontaktech, jejich výrobcích, službách a speciálních nabídkách můžete rovněž získat na internetové adrese www.promareha.cz.

Zákaznické oddělení: (+420) 491 11 22 33

Bezstarostné užívání zakoupeného výrobku Vám přeje

společnost PROMA REHA, s.r.o.

1. Úvod

Vyšetřovací lehátko je určeno pro vyšetřování pacientů. Na lehátko lze pomocí samosvoru polohovat zádový díl ložné plochy. Lehátko je vybaveno držákem role hygienického papíru. Díky robustní konstrukci a pevné výšce ložné plochy má lehátko výbornou stabilitu.

Výrobce je oprávněn k produkci výrobků tohoto typu na základě "Povolení k výrobě a distribuci prostředků zdravotnické techniky", uděleným Ministerstvem zdravotnictví České Republiky č.j. FAR-742-25.4.1995 733/8. Pracuje dle certifikovaného systému řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001 a dle certifikovaného systému environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2005.



Lehátko nepoužívejte, ani s ním jinak nemanipulujte, dokud se podrobně neseznámíte s celým návodem k použití! Veškeré úkony a obsluha lehátka musí být prováděny v souladu s návodem k použití. Jakékoliv jiné úkony, které jsou v rozporu s návodem k použití nebo účelem použití lehátka jsou prováděny na vlastní nebezpečí a výrobce nenese žádnou odpovědnost za případné vzniklé škody či ublížení na zdraví. Proto je nezbytné, aby po celou dobu životnosti lehátka byl návod k použití dostupný obsluze.

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v obsahu tohoto návodu k použití související s technickými parametry a úpravami vyšetřovacího lehátka.

Lehátko smí používat a obsluhovat pouze osoby, které jsou podrobně seznámeny s návodem!

2. Způsob dodávky

Lehátko je dodáváno v rozložené podobě a po složení je připravené k použití. Příslušenství je dodáváno odděleně s potřebným spojovacím materiálem k upevnění na lehátko. Při dodání musí být celý obsah dodávky zkontrolován dle dodacího listu. Jakékoliv závady, poškození či nedostatky musí být neprodleně písemnou formou oznámeny dopravci a výrobcí.

Dbejte na to, aby lehátko nebyla posouvána po zemi, ale vždy nošena. Při posouvání může dojít k poškození nožiček či ztrátě zásepek.

3. Bezpečnostní pokyny

- před vlastním užitím lehátka je nezbytné seznámit se s návodem k použití a obsluhu provádět výhradně v souladu s ním
- lehátko smí obsluhovat pouze osoby, které jsou k tomu způsobilé a podrobně seznámené s návodem
- lehátko nesmí být používáno, pokud byly zjištěny závady, které by mohly poškodit pacienta, obsluhující personál, vlastní lehátko apod.
- lehátko smí být používáno pouze v interiéru
- lehátko smí být používáno pouze na rovných podlahách
- lehátko nesmí být přetěžováno
- lehátko je výhradně určeno pro jednoho pacienta
- při polohování zádového dílu nesmí být v prostoru mezi rámem lehátka a zádovým dílem žádné předměty ani části těla – mohlo by dojít k jejich poškození nebo poranění pacienta, obsluhy či třetí osoby
- nebezpečí úrazu pacienta, obsluhy, třetí osoby nebo poškození okolního zařízení může vzniknout především:
 - nedovoleným používáním
 - neopatrným postupem při polohování zádového dílu lehátka
 - provozem lehátka na povrchu, pro který není určeno
 - údržbou nepovoleným způsobem nebo neoprávněnou osobou

4. Podmínky použití

Lehátko smí být používáno výhradně v interiéru, kde rozsah teplot okolí je v rozmezí od 10°C do 40°C a relativní vlhkost je v rozmezí od 30% do 75%.

5. Technické parametry

	CLASSIC
Vnější rozměry	67 x 200 cm
Rozměry LP	67 x 200 cm
Výška LP	62 cm
Poloh. zádového dílu	0° - 76°
Nosnost	170 kg
Hmotnost	40 kg

6. Instalace a uvedení lehátka do provozu

1. Důkladně prostudujte návod k použití
2. Odstraňte veškerý obalový materiál z lehátka a ekologicky jej zlikvidujte. Především se soustředte na provázky označené symbolem s nůžkami, které fixují při přepravě pohyblivé části k pevným.
3. Dle dodacího listu ověřte úplnost dodávky a její stav. Případné nedostatky zaznamenejte do dodacího nebo přepravního listu a v písemné podobě předejte výrobci nebo prodejci.
4. Složte rozložené lehátko dle následujícího postupu – položte lehátko čalouněno částí ložné plochy na podlahu. Uchopte nožičky pod zádovým dílem a vtyčte je do kolmé pozice vůči ložné ploše. Těhlici připevněte ve středu lehátka mezi oka pomocí čepu. Obdobným způsobem vzyčte i nožičky pod nožní částí ložné plochy a jejich těhlici zajistěte mezi stejná oka pomocí totožného čepu.
5. Je-li součástí dodávky lehátka i příslušenství, nainstalujte jej dle návodu k použití.
6. Dle návodu přezkoušejte funkčnost jednotlivých částí lehátka
 - Polohování zádového dílu ložné plochy pomocí samosvoru
 - Dle dodaného příslušenství prověřte jeho správnou funkčnost
7. Pečlivě uschovejte návod k použití

7. Obsluha lehátka

Polohování zádového dílu ložné plochy se provádí pomocí samosvoru, který se ovládá červenou pákou (poz. 1) na levé nebo pravé straně ložné plochy. Uchopte zádový díl (poz. 2) za okraj a zvedněte jej od rámu lehátka do požadované polohy. Ve chvíli, kdy uvolníte zádový díl, dojde k jeho automatickému zajištění pomocí samosvorného mechanismu. V kterýkoliv okamžik (kromě maximální pozice zádového dílu) můžete zádový díl uchopit a dál jej zvedat od rámu lehátka. Pro polohování zádového dílu dolů je zapotřebí použít libovolné červené páky (poz. 1) po boku ložné plochy. Nejprve uchopte jednou rukou zádový díl, následně druhou rukou zvedněte červenou páku směrem vzhůru (ve směru vyznačeném černou šipkou na ovládací páce) a držte ji. V tento okamžik se uvolní samosvorný mechanismus a zádovému dílu nic nebrání v pohybu dolů do vodorovné pozice. Proto jej držte rukou a tento pohyb kontrolujte. Napoložte zádový díl do požadované polohy směrem dolů a uvolněte červenou páku. Jejím uvolněním dojde k aretaci zádového dílu v aktuální pozici.



Vždy před zvednutím červené ovládací páky nejprve uchopte zádový díl a kontrolujte jeho pohyb směrem dolů. V opačném případě po zvednutí ovládací páky dojde k jeho samovolnému pádu do vodorovné polohy s pevným nožním dílem.



Při polohování zádového dílu nesmí žádný cizí předmět zasahovat do prostoru mezi rámem lehátka a zádovým dílem. Mohlo by dojít k jeho znehodnocení nebo k ublížení na zdraví.

Je zakázáno polohování zádového dílu lehátka s opřeným pacientem. Mohlo by dojít k vážnému poranění obsluhy i pacienta!!!

Lehátko je pod ložnou plochou hlavové části vybaveno držákem role hygienického papíru. Navlékněte roli hygienického papíru na madlo držáku a dle potřeby přetáhněte hygienický papír přes ložnou plochu. Po použití hygienický papír ekologicky zlikvidujte.

8. Čištění

Před prvním použitím doporučujeme lehátko řádně vyčistit. Lehátko čistěte běžnými tekutými saponátovými a dezinfekčními prostředky v koncentracích předepsaných pro zdravotnictví. Čištění provádějte otíráním řádně vyždímaným hadrem. Je nezbytné vyloučit abrazivní čisticí prostředky jako např. písky na nádobí či drátěnky.

Při použití nevhodného mycího nebo dezinfekčního prostředku, nedodržení předpisů výrobce ohledně dávkování desinfekčních prostředků, nebo nedostatečné či chybné péči o vyšetřovací lehátko mohou vzniknout škody, na které se nevztahuje záruka. Vyšetřovací lehátko není určeno do myček ani sterilizátorů!

9. Skladování

Při skladování dodržujte všechny výše popsané a zmíněné postupy, zejména:

- Lehátko očistěte a důkladně vysušte
- Demontujte veškeré příslušenství
- Lehátko a příslušenství opatřete vhodnými obalovými materiály, aby uskladněním nemohlo dojít k jakémukoliv poškození výrobku ani jeho částí
- Vše skladujte v prostředí definovaném v bodě 4, tj. rozsah teplot okolí je v rozmezí od 10°C do 40°C a relativní vlhkost je v rozmezí od 30% do 75%.

10. Údržba

Jedenkrát ročně důkladně zkontrolujte mechanismus polohování zádového dílu. Pokud dojde při údržbě lehátka k zjištění závady, kontaktujte prodejce či výrobce.

11. Servis

Vyšetřovací lehátka nevyžadují žádné pravidelné servisní zásahy.

12. Záruka


Na lehátka je poskytována standardní záruka 24 měsíců. Tato záruka se začíná počítat dnem dodání, pokud kupní nebo jiná smlouva nestanoví jinak. Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce nebo autorizované servisní středisko, na základě písemného osvědčení o způsobilosti tyto činnosti vykonávat. Příslušné osvědčení autorizovanému servisnímu středisku vydává výrobce.

13. Likvidace výrobku

Výrobek je vyroben z materiálů, které jsou šetrné pro životní prostředí. Neobsahuje žádné nebezpečné látky a jeho provozní hlučnost splňuje všechny požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví před nežádoucími účinky hluku a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb.

Všechny odpadní obaly vzniklé uvedením výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech. Roztřídte je dle uvedených grafických symbolů a předejte oprávněné osobě k dalšímu využití.

Výrobek obsahuje recyklovatelné ocelové části s povrchovou úpravou vypalovacími laky, chromem či zinkem. Dále výrobek obsahuje dřevěné, plastové, textilní a pryžové části. Pro likvidaci výrobku po ukončení jeho používání kontaktujte vybranou organizaci specializovanou na tuto činnost, či využijte služeb sběrných či recyklačních dvorů.

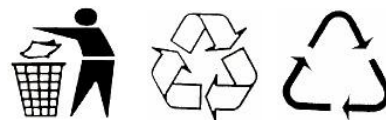

Výrobek není určen k odstranění jako součást komunálního odpadu! V případě nesprávného postupu při odstraňování odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty!

14. Obsah balení

- 1 x Vyšetřovací lehátka dle typu
- 1 x Držák papíru
- 1 x Návod k použití

15. Kontakt

PROMA REHA, s.r.o., Riegrova 342, CZ-55203 Česká Skalice
tel.: +420 491 11 22 33, : +420 491 54 11 85
info@promareha.cz, www.promareha.cz
IČO: 63219107, DIČ: CZ63219107, reg. v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 7945