

Model:
MEDI 1251, 1253

Montážní postup :

1. vybalení kříže a nasazení koleček
2. nastrčení pístu do kříže
3. nasazení krytu pístu (pokud není již z výroby)
4. nasazení sedáku židle (u 1251 celého korpusu)
5. u 1253 nasunutí zádové opěrky do otočné části nosiče dle nákresu a upevnění (dotažení pojistným šroubem proti vysunutí)
6. zatížení židle tak, aby všechny části do sebe dobře zapadly
7. individuální seřízení výšky židle:

Model 1251:

- a) stlačení kruhu pod sedákem umožní nastavení výšky sedáku směrem nahoru či dolů

Model 1253:


- a) přidržení páčky pod sedákem v horní poloze uvolní posun sedáku nahoru či dolů
- b) mechanické povolení pojistného šroubu na mechanice vzadu dole umožní posun zádové opěrky vzad a dopředu

Pozn.: všechny modely označené „dent“ mají v základní výbavě vysoký píst a nastavitelnou kruhovou oporu nohou

obr. 1251



obr. 1253

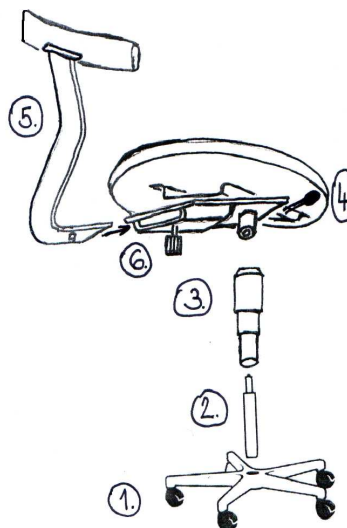

Seznam komponentů:

- | | |
|--|---|
| 1 – nosný pětiramenný kříž s kolečky | |
| 2 – píst | 3 |
| – kryt pístu | |
| 4 – sedák s nosnou mechanikou (u 1251 celý korpus) | |
| 5 – zádová opěrka | |
| 6 – pojistný šroub (jen u 1253) | |

Návod k čištění výrobku :

- ❖ všechny kovové i plastové díly lze čistit jen vodou se saponáty, k oživení plastů lze použít renovační spray určený pro přístrojové desky interiérů automobilů.
- ❖ čalounění látkové lze čistit jen jemným, ne moc mokrým šampónováním. **Nelze používat žádná rozpouštědla ani prací prášky.**
- ❖ čalounění koženkové lze při potřísnění kapalinami odsát, pak očistit mýdlovým roztokem, vysušit. Při znečištění pevnými nečistotami setřít vlhkou, měkkou houbičkou. Nelze čistit hrubými materiály, např. kartáčem! Nikdy nepoužívat chemická rozpouštědla a nevystavovat přímému slunečnímu záření.
- ❖ čalounění kožené z pravé kůže lze čistit jen speciálními prostředky pro čištění a ožívování kůže
- ❖ čalounění AQUACLEAN - skvrny můžeme odstranit savým hadříkem s použitím jen malého množství vody. Skvrny se mohou i vydrhnout! Jemný čisticí prostředek je nutný pouze u absolutně vzdorujících skvrn

UPOZORNĚNÍ:

- židle jsou určeny výhradně k sezení
- židle jsou určeny pouze pro jednosměnné provoz (8 hod. denně)
- na otočné a konferenční židle nikdy nestoupejte, hrozí nebezpečí úrazu!
- během používání židlí je nutné občas dotáhnout všechny šrouby, které se vlivem mechanických rázů, sesycháním dřevěných částí židlí a čalounění uvolňují.

Všeobecné záruční podmínky židlí MAYER :

Gratulujeme Vám k zakoupení kvalitního výrobku zn. MAYER. Byl vyroben s největší pečlivostí a před odesláním zkontrolován ve výrobním závodě. Na výše uvedený výrobek poskytuje výrobce záruku **36** měsíců od data prodeje s tím, že:

Výrobce neodpovídá za :

- ❑ poškození způsobené nesprávnou montáží nebo neoprávněným zasahováním do jednotlivých částí výrobku
- ❑ poškození způsobené vodou, znečištěním nebo nevhodným čištěním
- ❑ mechanické poškození čalounění
- ❑ nadměrné opotřebení ve vícesměnném nebo restauračním provozu
- ❑ nadměrné opotřebení způsobené neběžným užíváním (zvýšený prach, špína, ...)
- ❑ mechanická poškození nárazem
- ❑ mechanická poškození nadměrným zatěžováním (váha sedícího nad 120 kg)
- ❑ pohledové vady nenahlášené písemně do 3 dnů po převzetí
- ❑ vyblednutí potahu vlivem nadměrného vystavení slunci
- ❑ mírné vytažení potahových textilií, koženek a kůže a drobné rozdíly ve struktuře a zabarvení přírodních materiálů (dřevo a kůže)
- ❑ poškození způsobené zvířaty (domácími mazlíčky)

Při případné reklamaci je nutné předložit fakturu o zakoupení výrobku

V případě reklamáce se prosím obraťte na prodejce zn. MAYER, u kterého jste výrobek zakoupili. Prodejce je povinen výrobcí písemně nahlásit :

- číslo faktury výrobce
- číslo reklamovaného modelu
- podrobný popis závady
- číslo nálepky výstupní kontroly
- kontaktní osobu pro dohodnutí postupu

MEDI

1251, 1253

Návod k montáži a používání č. 13



Záruční podmínky

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za projevenou důvěru při koupi tohoto zboží a pevně věříme, že ji neklameme.

Přejeme dlouhodobé užívání Vámi zakoupeného zboží k Vaší plné spokojenosti.

Výrobce